


# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## Standardowy wózek inwalidzki stalowy

WYRÓB MEDYCZNY  
Wer. 1 10/2022

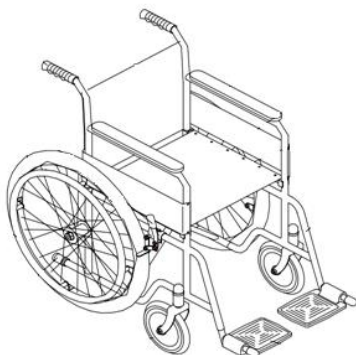


**REF** BME4611

### PRZENACZENIE


Wózek inwalidzki ręczny służy jako środek transportu dla osób niepełnosprawnych, pacjentów i osób starszych.

### BUDOWA WÓZKA

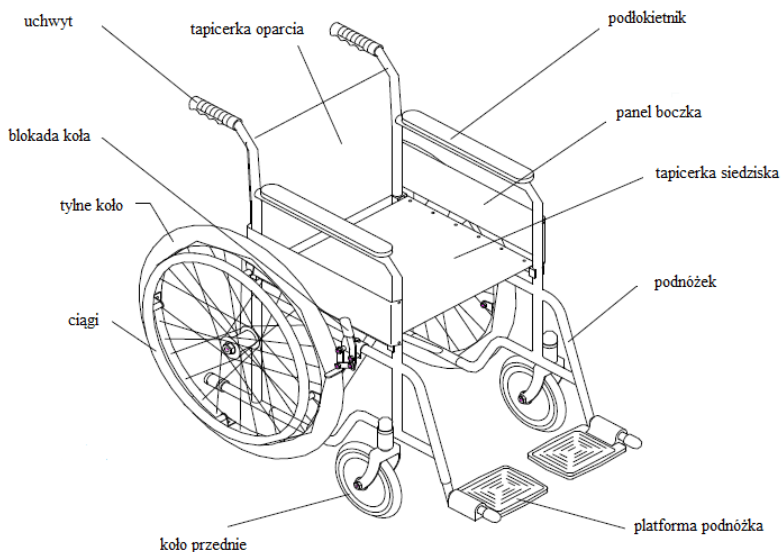

## JAK ROZŁOŻYĆ WÓZEK ZE STAŁYM OPARCIEM?

Potrzebne akcesoria: instrukcja obsługi i klucz do wózka.

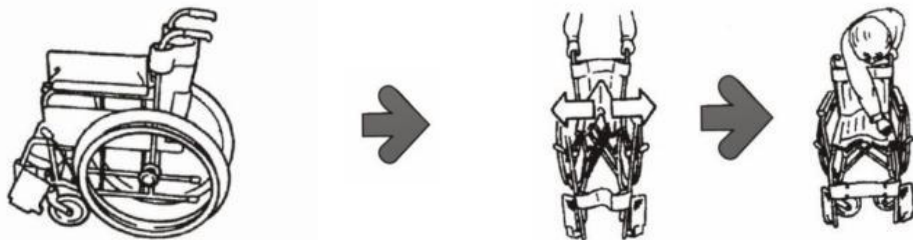

Krok 1: Stań za wózkiem inwalidzkim i wyciągnij go na zewnątrz, aby otworzyć siedzenie.


Krok 2: Następnie naciśnij siedzenie, aby je otworzyć.



**UWAGA!** Nie kładź dłoni ani palca na rurkach przy siedzeniu lub pod siedzeniem.


## REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA

### METODA 1

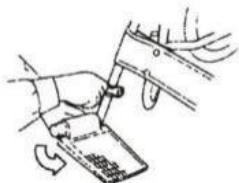


Obróć platformę podnóżka w kierunku strzałki i wyreguluj jej wysokość. Następnie dokręć nakrętkę z boku rury za pomocą dołączonego klucza.


### METODA 2

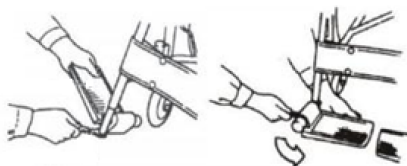

1. Za pomocą klucza poluzuj część podnóżka, do której przymocowana jest platforma podnóżka.
2. Obróć platformę podnóżka w kierunku strzałki i dokręć kluczem.

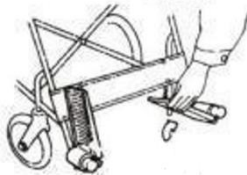


**UWAGA!** Podnieś platformy podnóżka w górę za każdym razem podczas wsiadania i zsiadania z wózka!

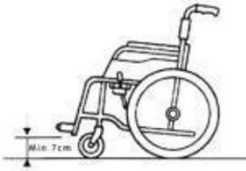


**!** Uwaga! Upewnij się, że platforma podnóżka znajduje się co najmniej 7 cm nad ziemią. Jeśli jest umieszczona zbyt nisko, uderzy w przeszkody podczas jazdy po nierównym podłożu. To może zachwiać równowagę wózka!

### SKŁADANIE WÓZKA

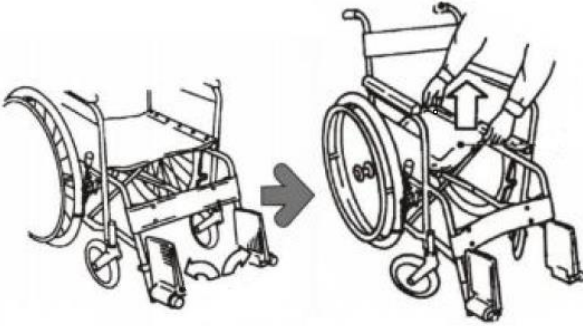

Krok 1: Unieś platformy podnóżków w kierunku strzałek.  
Krok 2: Następnie podnieś siedzenie, aby je złożyć.

### UŻYWANIE BLOKAD HAMULCÓW

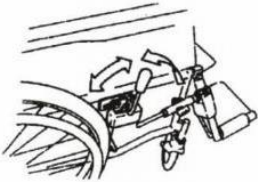


Pociągnij dźwignie blokad po obu stronach do tyłu, aby zablokować wózek inwalidzki. Aby odblokować wózek inwalidzki, pociągnij dźwignie blokad do przodu.

### **!** UWAGA!

1. Pamiętaj, aby zaciągnąć hamulec nawet podczas krótkiego postoju. Wypracuj nawyk wciskania blokad.
2. Wózek inwalidzki nie jest w stanie zatrzymać się natychmiastowo, więc nie przyspieszaj, gdy na nim siedzisz.
3. Podczas skrętu w ostry zakręcie należy zmniejszyć prędkość, aby uniknąć przewrócenia.
4. Przed popchnięciem wózka należy upewnić się, że pacjent ma stopy na platformach podnóżków.
5. Zawsze należy najpierw dbać o bezpieczeństwo. Jeśli pacjent nie czuje się bezpiecznie operując wózkiem samodzielnie, powinien poprosić o pomoc.


### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WÓZKA

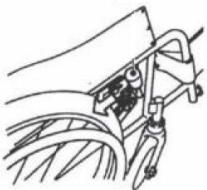

Upewnij się, że hamulec jest zablokowany podczas siadania/zsiadania z wózka inwalidzkiego. Upewnij się, że prawidłowo korzystasz z blokad hamulca.




Nie stawaj na podnózek podczas zsiadania z wózka, w przeciwnym razie wózek przewróci się do przodu.

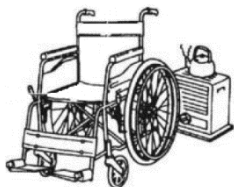

Nie umieszczaj wózka inwalidzkiego w pobliżu źródeł ognia, w przeciwnym razie oparcie może się zapalić i spowodować obrażenia.



Aby wjechać wózkiem na stopień, opiekun prowadzący wózek musi dźwignąć rurę przechylającą i popchnąć w dół uchwyty, tak aby przednie kółka zostały podniesione na stopień, a następnie pociągnąć do góry za uchwyty, aby podnieść tylne koła. Nie próbuj pokonywać stopni siłą.

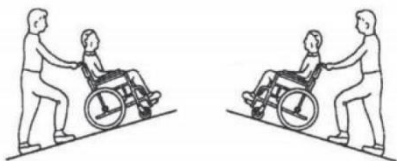

Aby poruszać się w górę lub w dół, upewnij się, że osoba pchająca wózek jest w pobliżu; w przeciwnym razie wózek może się przewrócić. W przypadku stromego spadku wózek inwalidzki należy obrócić tak, aby pacjent był twarzą do góry. Osoba prowadząca wózek powinna stopniowo sprowadzać go w dół.



Podnosząc wózek inwalidzki z pacjentem, nie trzymaj uchwytów. W przeciwnym razie wózek może ulec uszkodzeniu.

## PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Nr katalogowy / Nazwa		STANDARDOWY WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Szerokość siedziska [mm]		450
Całkowita szerokość [mm]		620
Całkowita długość [mm]		1020
Całkowita wysokość [mm]		860
Głębokość siedziska [mm]		420
Wysokość oparcia [mm]		420
Wysokość podłokietników od siedziska [mm]		290
Wysokość siedziska od podłoża [mm]		460
Maksymalne bezpieczne obciążenie [kg]		110 kg
Waga wózka podstawowego [kg]		17 kg
Stabilność statyczna [°]	z góry	9°
	pod górkę	9°
	poprzeczna	9°
Średnica kół	przednie	200
	tylne	600
Temperatura użytkowania i przechowywania		od -15° C do 40° C

## LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rączki do popychania	kauczuk butylowy
Koło tylne	PU (poliuretan) lub kauczuk butylowy
Ciągi	stal
Blokada kół (hamulec)	stal
Krzyżak	stal
Rama	stal
Widelec	stal
Koło przednie 8"	PVC (polichlorek winylu) + ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Platforma podnóżka	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Pasek zabezpieczający stopę	poliester
Podnóżek	stal
Tapicerka siedziska	poliester + pianka poliuretanowa
Tapicerka oparcia	poliester + pianka poliuretanowa
Hamulce dla asystenta	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Podłokietnik	PVC (polichlorek winylu) + pianka poliuretanowa

## IMPORTER

Reha Fund Sp. z o. o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa  
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl



**Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co., Ltd**

**Address: 718 Fanou Modern Building, No 2449 Gonghexin Road, Jingan District, Shanghai City, China,  
Tel. 0086-21-51876643**

**Email: brothermedical2@hotmail.com**

**www.brothermedical.com**



**SUNGO Europe B.V.**

**Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands**

**email: ec.rep@sungogroup.com**



**NOTATKI**

**KARTA GWARANCYJNA**  
**Standardowy wózek inwalidzki stalowy**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczętka sprzedawcy:

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz bez wad.
2. Rama wózka jest objęta 60 miesięcznym okresem gwarancji, pozostałe części są objęte 36 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że wózek był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych czas naprawy może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany.
6. Gwarancją nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją wózka inwalidzkiego opisane w instrukcji użytkowania;
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, sprężyny, plastikowe wykończenia, tapicerka itp.;
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia wózka inwalidzkiego np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
  - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami rozpatrzenia reklamacji.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

**WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)**

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					