

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA ISĀ PĒDAS UN APAKŠSTILBA ORTOZE "AIR WALKER SHORT" O-1181



UZMANĪBU! Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas reizes iepazīstieties ar šo dokumentu.

Iegādājoties izstrādājumu, pārbaudiet tā pilnīgumu un kvalitātes stāvokli. Par jebkādam problēmām ziņojiet izdevējam. Ziņojot par problēmām ar daudzumu/kvalitāti, rīkojieties atbilstoši garantijas kartē norādītajiem noteikumiem, proti, uzrādiet pirkumu apliecināšu dokumentu un mazumtirdzniecības punkta aizpildīto garantijas karti.

I. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


- Pateicoties savai vieglajai konstrukcijai, isā pēdas un apakšstilba ortoze "AIR WALKER SHORT" nerada slodzi uz traumētu ekstremitāti. Tā ir aprīkota ar vienkameras gaisa sistēmu, integrētu sūkni un gaisa izlaišanas vārstu, lai nodrošinātu labāku aizsardzību un iespēju regulēt kompresiju atkarībā no slimības stāvokļa. Noņemamais priekšējais panelis ļauj pilnībā atvērt apavu, atvieglojot tā uzvilkšanu. Noapaļota pretslīdes zole nodrošina drošu un fizioloģisku gaitu. Ortoze ir aprīkota arī ar regulējamu un noņemamu pirkstu aizsargu.

II. ĪPAŠĪBAS

Ortoze AIR WALKER SHORT ir lieliska alternatīva tradicionālai gipsa imobilizācijai, kas ievērojami uzlabo lietošanas komfortu. Iespēja regulēt spiediena spēku, izmantojot gaisa sistēmu, samazina hematomu un tūsku rašanās iespēju. Pilnībā atvērta konstrukcija nodrošina iespēju vizuāli pārbaudīt traumu un uzturēt ekstremitāti atbilstošā higiēniskā stāvoklī.

III. LIETOŠANAS VEIDS

- Pārliecinieties, ka izstrādājuma izmērs ir pareizi izvēlēts.
- Pirms ortozes uzlikšanas attaisiet visas siksnas, noņemiet priekšējo paneli un atveriet iekšējo auduma oderējumu.
- Ievietojiet kāju apava iekšā, aptiniet pēdu un apakšstilbu ar polsterējumu.
- Pārliecinieties, ka gaisa sūknis atrodas tieši kājas vidū.
- Uzlieciet priekšējo paneli tā, lai gaisa sūknis atrastos tā atverē.
- Aiztaisiet visas četras apava siksnas, piestiprinot to pie kājas.
- Lai uzpumpētu gaisa sistēmu, pagriežiet zem pumpja esošo vārstu pa labi un pumpējiet bumbiervēda pumpi, līdz tiek iegūta cieša piegulēšana. Atcerieties, lai izvairītos no pārmērīgas pūšanas. Pēc katras lietošanas reizes izlaidiet gaisu, pagriežot vārstu pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.

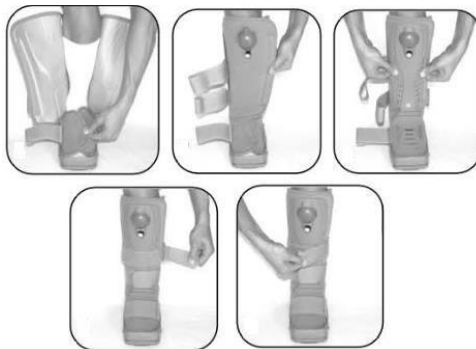

IV. IZMĒRU TABULA

Izmērs	Apava izmērs
S	35–40
M	40–44
L	44–47

V. SASTĀVS

Polipropilēns 45 %, poliesteris 20 %, poliuretāns 20 %, termoplastiskais poliuretāns 15 %.

VI. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

- Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem.
- Ortozes uzvilšanas veids ir jāparāda kvalificētam medicīnas personālam personas, kas aprūpē lietotāju (ja attiecas).
- Izstrādājums un tā elementi ir jāizmanto tikai to paredzētajam mērķim.
- Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas sāpes, pietūkums, jušanas traucējumi vai jebkādas neparastas reakcijas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
- Izstrādājuma lietošana nakī ir pieļaujama tikai tad, ja to iesaka ārstējošais ārsts.
- Ilgstoša ortozes lietošana var izraisīt locītavu aktīvo un pasīvo kustību ierobežojumus un muskuļu atrofiju, tāpēc ieteicams sistemātiski veikt vingrinājumus, ko pēc ārstējošā ārsta ieteikuma izvēlēties kvalificēts medicīniskais personāls.
- Izstrādājums jāuztur tīrs saskaņā ar šajā instrukcijā un uz izstrādājumam esošās etiķetes sniegtajiem norādījumiem. Nepareiza izstrādājuma tīrīšana un kopšana var izraisīt ādas bojājumus.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot, ja trūkst jebkādas no tā elementa. Nedrīkst lietot divus vienādus vai atšķirīgus izstrādājumus vienlaikus.

VII. PIELIETOJUMS

Izstrādājumu var lietot šādos gadījumos:

- pēcoperācijas ārstēšana (Ahileja cīpslas plīsums, saites (mīksto audu un cīpslu) bojājums);
- neoperatīva ārstēšana (metatarsālo kaulu lūzumi, Ahileja cīpslas traumas, smagas deformācijas);
- stabils pēdas un locītavu lūzums;
- pēcoperācijas aprūpe pēc lūzumiem (potītes, augšējās potītes locītavas izmežģījums);
- ortozes aptvertā gabalā pastāvīgu vai pagaidu disfunkciju ārstēšana un rehabilitācija.

VIII. KONTRINDIKĀCIJAS

- lielā vai mazā lielakaula nestabili lūzumi vai to proksimālās daļas lūzumi;
- mīksto audu defekti un brūču dzīšanas problēmas;
- esošas limfodrenāžas problēmas;
- Pārāk cieša ortozes uzlikšana var izraisīt sāpju pastiprināšanos, un pārāk vaļīga ortozes uzlikšana var izraisīt vēlamā rezultāta trūkumu.
- Ja vietās, kur pieguļ ortoze, ir radušies ādas bojājumi, tās lietošana ir ierobežota un iespējama tikai ārsta uzraudzībā.
- Ārstam ir jāizvērtē ortozes lietošana cilvēkiem ar dažādas izcelsmes atmiņas traucējumiem, cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem un bērniem.

IX. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Izstrādājumu ieteicams regulāri mazgāt. Pirms mazgāšanas jāizņem izstrādājuma metāla elementi (ja tas ir iespējams) un jāaiztaisa visi ortozes līplentes savienojumi.

- Mazgāt ar rokām temperatūrā līdz 40 °C ūdenī ar neitrālu, antialergisku mazgāšanas līdzekli.
- Skatīt remdenā ūdenī, neizmantojot mīkstinātājus.
- Neizgriezt.
- Nebalināt.
- Negludināt.
- Netīrīt ķīmiski.
- Nežāvēt veļas žāvētājā.
- Žāvēt plakani ēnainā un labi vēdināmā vietā — nepakļaut izstrādājumu tiešai saules staru iedarbībai. Izstrādājums nav karstumizturīgs un zaudē savas īpašības augstā temperatūrā virs 120 °C.

SIMBOLU SKAIDROJUMS

	Ražotājs
	CE marķējums
	Atsauces numurs
	Ražošanas datums
	Skatīt lietošanas instrukcijā.
	Brīdinājums
	Sērijas numurs
	Augšpuse, neapgriezt
	Uzglabāt sausā vietā.
	Trausls, rīkoties uzmanīgi.
	Nepārgriezt.
	Iepakojums piemērots atsevišķai pārstrādei.
	Mazgāt ar rokām.
	Nebalināt.
	Negludināt.
	Nefīrīt ķīmiski.
	Nežāvēt veļas žāvētājā.



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polija
tālr.: +48 22 594 03 00, fakss: +48 22 594 03 07
e-pasts: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
Izdots:

Garantijas karte
ISA PĒDAS UN APAKŠSTILBA ORTOZE
“AIR WALKER SHORT” O-1181

Modelis:	Sērijas numurs:	Pārdošanas datums:	Pārdevēja paraksts un zīmogs:

GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Ražotājs apliecina klientam, ka pārdošanas priekšmets, kuram izsniegta šī garantijas karte, ir pilnīgi jauns un kvalitatīvs.
2. Izstrādājumam tiek sniegta 18 mēnešu garantija, sākot no garantijas kartē norādītā pārdošanas datuma.
3. Garantijas sūdzības izskatīšanas pamats ir pareizi aizpildītas garantijas kartes iesniegšana kopā ar pievienoto pirkumu apliecinājošu dokumentu.
4. Iespējamus iekārtas defektus novērsīs uzņēmums *REHA FUND Sp. z o.o.* vai tā autorizētie servisa speciālisti, ja vien izstrādājums tika lietots saskaņā ar tā paredzēto pielietojumu un lietošanas instrukcijas norādījumiem.
5. Remonts vai apmaiņa tiks veikti pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iekārtas pieņemšanas servisa centrā dienas.
6. Garantija neattiecas uz:
 - lietošanas instrukcijā aprakstītajām darbībām, kas saistītas ar jostas kopšanu, tīrīšanu un regulēšanu;
 - elementiem, kas nodilst parastas lietošanas laikā;
 - jostas mehāniskiem un termiskiem bojājumiem, piemēram, plīsumi, pārrāvumi u. tml.;
 - bojājumiem, kas radušies iekārtas lietošanas neatbilstoši lietošanas instrukcijai, nolaidības, patstāvīga remonta, modifikāciju vai konstrukcijas izmaiņu rezultātā.
7. Pirms iekārtas nodošanas autorizētajā servisa centrā tā ir jāiztīra saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai tā būtu piemērota servisa apskates veikšanai.
8. Remontu un nomainītu drīkst veikt tikai uzņēmuma *Reha Fund Sp. z o.o.* autorizētā servisa centra speciālisti.
9. Nepamatotas sūdzības gadījumā klientam ir jāsedz piegādes izmaksas.
10. Garantija ir derīga Latvijas Republika teritorijā.
11. Garantija pārdotajai precei neizslēdz, neierobežo un neaptur klienta tiesības, kas saistītas ar preces neatbilstību līguma noteikumiem.

SERVISA REMONTA DARBU SARAKSTS (aizpilda servisa centrs)

N. p. k.	Iesniegšanas datums	Pasūtījuma Nr.	Defekta apraksts/remonta apjoms	Remonta veikšanas datums	Servisa centra zīmogs un paraksts
1.					
2.					

PIEZĪMES