

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA TUALETES KRĒSLS LOUIS 840

MEDICĪNISKĀ IEKĀRTA

Kataloga Nr.	RF-840/N	RF-840/CZA
Polsterējuma krāsa	zils	melns
Rāmja krāsa	pelēks	pelēks
Maksimālā drošā slodze	130 kg	130 kg
Svars	8 kg	8 kg
Kopējais platums	56 cm	56 cm
Kopējais augstums	80–95 cm	80–95 cm
Dziļums	52–57 cm	52–57 cm
Sēdekļa platums	43 cm	43 cm
Sēdekļa dziļums	42 cm	42 cm
Sēdekļa augstums	40–55 cm	40–55 cm
Tualetes atveres izmērs	24 × 21 cm	24 × 21 cm



UZMANĪBU! Pirms sākat lietot krēslu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas. **PAREDZĒTAIS**

PIELIETOJUMS

Tualetes krēsls pilda pārnēsājamās tualetes funkciju. Krēslu var lietot pie pacienta gultas. Tas palīdz cilvēkiem ar kustību traucējumiem (pastāvīgiem vai periodiskiem) un vecāka gadagājuma cilvēkiem veikt fizioloģiskās pamatdarbības. Krēslu var izmantot arī kā tualetes paaugstinājumu, kā arī kā parasto krēslu. Krēsls atvieglo pacienta aprūpi. Margas atvieglo piecelšanos no krēsla un apsēšanos tajā. Tas ir paredzēts lietotājiem ar ierobežotām kustību spējām, bet ar pietiekamu sēdēšanas spēju. Krēsls ir noderīgs šādos gadījumos: pacienti ar ierobežotu rumpja kontroli, cilvēki ar līdzsvara traucējumiem, reiboni, cilvēkiem ar apakšējo ekstremitāšu funkcijas traucējumiem, stipri ierobežots mugurkaula jostas daļas, gūžas un ceļa locītavas kustīgums, paralīze.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI


Lai nodrošinātu drošību, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

1. Pirms tualetes krēsla lietošanas pārliecinieties, ka:
 - krēsla augstums ir pareizi noregulēts;
 - bloķēšanas pogas darbojas pareizi;
 - gumijas uzgaļi ir labā stāvoklī;
 - visas krēslu kājas ir uzstādītas tajā pašā augstumā.
2. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Neoriģinālu daļu izmantošana var izraisīt nepareizu krēsla pielāgošanu, kā rezultātā rodas kritiena risks.
3. Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo slodzi uz krēslu.
4. Krēslu nedrīkst uzglabāt temperatūrā zem 0 °C.
5. Par visiem nopietniem incidentiem saistībā ar ierīci jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs vai pacients.
6. Krēslu nedrīkst lietot uztveres traucējumu vai nopietnas problēmas ar nelīdzsvaru.
7. Apgāšanās risks paaugstinās lielas vienpusējas slodzes gadījumā.
8. Aizliegts uzkāpt uz krēsla, jo pastāv slīdēšanas risks.



UZMANĪBU! Iepriekš minēto drošības noteikumu neievērošana var izraisīt nopietnus nelaimes gadījumus.

KRĒSLA UZBŪVE

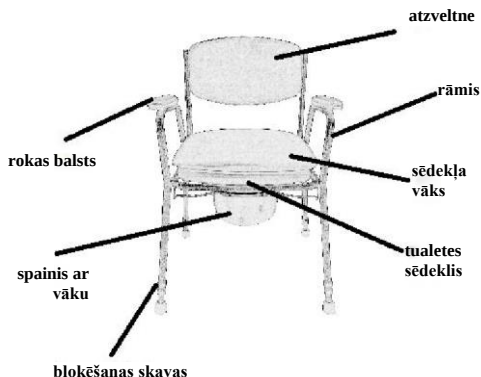

SPAIŅA IZŅEMŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Lai izņemtu spaini, izvelciet to no vadīklām krēsla sānos (2. att.) vai noņemiet no augšas, noliecot tualetes sēdekli (1. att.). Lai uzstādītu spaini, ievietojiet to vadīklās (2. att.) vai ievietojiet no augšas, noliecot tualetes sēdekli (1. att.).

AUGSTUMA REGULĒŠANA

1. Noņemiet bloķēšanas skavu — satveriet to starp īkšķi un rādītājpirkstu un pēc tam pavelciet uz āru (4. att.).
2. Pārvietojiet kājiņu uz leju vai uz augšu, lai iegūtu vēlamo augstumu (3. att.).
3. Ievietojiet bloķēšanas skavu atpakaļ attiecīgajā caurumā.
4. Pārliedzieties, ka bloķēšanas skava ir pareizi bloķējusi šo kājiņas pozīciju.

1. att.	2. att.
3. att.	4. att.

APSĒŠANĀS UN PIECELŠANĀS

1. Pārliedzieties, ka krēsls stāv stabili un ir gatavs lietošanai.
2. Nostājieties ar muguru pret krēslu tā, lai pieskartos ar ceļgalu aizmuguri krēsla priekšpusei.
3. Sniedzieties ar rokām uz aizmuguri un atbalstiet rokas pret margām.
4. Lēnām apsēdieties uz krēsla, saliecot elkoņus un, ja tas ir iespējams, ceļgalus un gurnus.
5. Lai pieceltos no krēsla, atbalstieties ar rokām pret margām un pacelieties. Pirms krēsla margu atlaišanas pārliedzieties, ka Jūs uzturat līdzsvaru.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Ieteicams regulāri pārbaudīt krēslu, lai pārliecinātos, ka tam nav redzamu bojājumu vai nodiluma pazīmju. Regulāri pārbaudiet, vai:
 - uz rāmja nav radušies plīsumi vai izliekumi;
 - apakšējie uzgaļi nav nodiluši — ja nepieciešams, nomainiet tos pret jauniem;
 - nekādi citi krēsla elementi nav vaļīgi vai bojāti.
- Pēc katras lietošanas reizes ieteicams iztīrīt krēslu ar mīkstu lupatiņu un ziepjdēni. Pēc tīrīšanas krēsls jānosusina ar mīkstu lupatiņu. Spaini var dezinficēt ar aukstu metodi, piemēram, ar etanolu.



UZMANĪBU! Krēsla tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus.

IZMANTOTO MATERIĀLU SARAKSTS

atzveltne	koks + putas + PVC (polivinilhlorīds)
rāmis	tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu
sēdekļa vāks	koks + putas + PVC (polivinilhlorīds)
bloķēšanas skava	PA6 (poliamīds)
spainis	PP (polipropilēns)
vāks	PP (polipropilēns)
rokas balsts	PVC (polivinilhlorīds)
uzgaļi	TPE (termoplastiskais elastomērs)

SIMBOLU SKAIDROJUMS

	Ražotājs
	CE marķējums
	Atsauces numurs
	Ražošanas datums
	Skatīt lietošanas instrukcijā.
	Brīdinājums
	Sērijas numurs
	Augšpuse, neapgriezt
	Uzglabāt sausā vietā.
	Trausls, rīkoties uzmanīgi.



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polija
tālr.: +48 22 594 03 00, fakss: +48 22 594 03 07
e-pasts: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Izdots: 03.2021.

GARANTIJAS KARTE
TUALETES KRĒSLS LOUIS 840

Modelis:	Sērijas numurs:	Pārdošanas datums:	Pārdevēja paraksts un zīmogs:

GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Ražotājs apliecina klientam, ka pārdošanas priekšmets, kuram izsniegta šī garantijas karte, ir pilnīgi jauns un kvalitatīvs.
2. Krēslam tiek sniegta 12 mēnešu garantija, sākot no garantijas kartē norādītā pārdošanas datuma.
3. Garantijas sūdzības izskatīšanas pamats ir pareizi aizpildītas garantijas kartes iesniegšana kopā ar pievienoto pirkumu apliecināšu dokumentu.
4. Iespējamus iekārtas defektus novērsīs uzņēmums *REHA FUND Sp. z o.o.* vai tā autorizētie servisa speciālisti, ja vien krēsls tika lietots saskaņā ar tā paredzēto pielietojumu un lietošanas instrukcijas norādījumiem.
5. Remonts tiks veikts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iekārtas pieņemšanas servisa centrā dienas.
6. Garantija neattiecas uz:
 - lietošanas instrukcijā aprakstītajām darbībām, kas saistītas ar krēsla kopšanu, tīrīšanu un regulēšanu;
 - elementiem, kas nodilst parastas lietošanas laikā;
 - krēsla mehāniskiem un termiskiem bojājumiem, piemēram, izliekumiem, skrāpējumiem, lūzumiem u. tml.;
 - bojājumiem, kas radušies iekārtas lietošanas neatbilstoši lietošanas instrukcijai, nolaidības, patstāvīga remonta, modifikāciju vai konstrukcijas izmaiņu rezultātā.
7. Pirms iekārtas nodošanas autorizētajā servisa centrā tā ir jāiztīra saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai tā būtu piemērota servisa apskates veikšanai.
8. Remontu un rezerves daļu nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmuma *Reha Fund Sp. z o.o.* autorizētā servisa centra speciālisti.
9. Nepamatotas sūdzības gadījumā klientam ir jāsedz piegādes izmaksas.
10. Garantija ir derīga Latvijas Republika teritorijā.
11. Garantija pārdotajai precei neizslēdz, neierobežo un neaptur klienta tiesības, kas saistītas ar preces neatbilstību līguma noteikumiem.

SERVISA REMONTA DARBU SARAKSTS (aizpilda servisa centrs)

N. p. k.	Iesniegšanas datums	Pasūtījuma Nr.	Defekta apraksts/remonta apjoms	Remonta veikšanas datums	Servisa centra zīmogs un paraksts
1.					
2.					