

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kājas ortoze zābaks ar regulējamu kustību apjomu ARmedical AR-605 (īsā) un AR-606 (garā) Walker Clock

Cienījamie klienti,

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu – mēs augstu vērtējam uzticību, ko esat mums dāvinājuši. Esam pielikusi visas pūles, lai mūsu izstrādājums atbilstu jūsu vēlmēm.

Mēs ceram, ka tas ievērojami veicinās komforta uzlabošanu un pareizo pēcooperācijas un konservatīvo pēdas un potītes traumu ārstēšanas procesu. Tas būs produkts, kas ievērojami atvieglo ikdienas dzīvi, neskatoties uz traumas/ievainojuma ārstēšanas procesu. Pirms lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju. Izstrādājuma lietošanas iespēja noteikti jākonsultē ar ārstu speciālistu. Pareiza uzlikšana ir nepieciešama jūsu drošībai un pilnai produkta funkcionalitātei.

Izstrādājuma pielietojums:

Ortoze zābaks Walker Clock ir paredzēta personām ar pēdas un potītes locītavas traumām. Nodrošina aizsardzību un stabilizāciju potītes locītavas mīksto audu traumu gadījumā, 2. un 3. pakāpes sastiepumiem, kaulu plaisām, potītes locītavas un viduspēdas stabilo lūzumu dziedināšanai. Tiek izmantota arī pēcooperācijas stabilizācijai kā imobilizācija ar iespēju turpināt ārstēšanu izvēlētajā terapeitiskajā diapazonā. Ir lieliska alternatīva tradicionālajai ģipša imobilizācijai, ievērojami uzlabojot lietošanas komfortu. Pateicoties integrētajai pumpim, garantē kompresijas pielāgošanu pacienta slimības stāvoklim, mazinot hematomu un tūskas rašanās iespēju. Garantē regulāras traumas vizuālas novērtēšanas iespēju un ekstremitātes uzturēšanu pienācīgā higiēniskā stāvoklī. Pateicoties vieglajai Walker Clock konstrukcijai, ekstremitāte netiek noslogota, bet izmantotā mīkstā pneimatiskā polsterēšana garantē augstu lietošanas komfortu. Turklāt sānu šinas ar ROM (angliski – range of motion, kustību diapazons) mehānismu ļauj ierobežot (regulēt) fleksiju. Uzlikšanas veids ir aprakstīts zemāk.

Izstrādājuma īpašības:

Zābaka formas šinas konstrukcija, izgatavota no viegla plastmasas materiāla. Elpojošs materiāls garantē pareizu gaisa cirkulāciju. Profilētas, komfortablas sānu malas, lai samazinātu spiedienu uz apakšstilbu. Aprīkots ar apkārtējo siksnu sistēmu individuālai stabilizācijas spēka pielāgošanai. Pneimatiskais polsterējums izgatavots no maiga materiāla, kas novērš berzi, aprīkots ar integrētu pumpi. Pretslīdes zole ar speciāli izstrādātu formu, kas palīdz dabīgā un stabilā gaitā. Zole aprīkota ar gaisa spilvenu uz papēža, kas absorbē enerģiju, lai mazinātu triecienus un uzlabotu lietošanas komfortu. Sānu šinas ar regulējamu kustību apjomu, kas ļauj imobilizēt izvēlētajā diapazonā. Kustība regulējama diapazonā 0–90° (ik pa 10°). Komplektā iekļauts individuāli regulējams pirkstu aizsargājošais vāciņš.

Tehniskie parametri:

Svars: līdz 850 g (AR-605) vai 1000 g (AR-606) atkarībā no izmēra. Krāsa: melna. Universāla: gan labajai, gan kreisajai kājai.

Kontrindikācijas un ieteikumi:

⚠ Nelietot atklātu brūču, ādas izmaiņu gadījumā, t.i. nobrāzumu, nospiedumu, apsārtumu, trofisku izmaiņu, ekzēmu un ādas čūlu gadījumā. Nedrīkst lietot atklātu vai nestabilu lūzumu gadījumā. Nelietot ortozī pēcooperācijas sasildošo ziedu vai gelu uzklāšanas. Personas ar jutīguma traucējumiem un diabētiķiem jāuzrauga ārstam speciālistam ortozes lietošanas laikā.

Pirms lietošanas noteikti jākonsultējas ar ārstu speciālistu, rehabilitologu vai fizioterapeitu.

Piezīmes un brīdinājumi:

⚠ Lai izvairītos no nelaimes gadījuma, pārvietojoties pa mitrām vai slidenām virsmām, jāievēro īpaša piesardzība. Izstrādājumam jābūt pareizi uzliktam, t.i., visām apkārtmēra siksnām jābūt droši nostiprinātām un gaisa kamerām jābūt pareizi piepūstām, lai nodrošinātu pareizu ekstremitāšu stabilizāciju — nepiesprādzētas ortozes lietošana var izraisīt negadījumu! Sānu šarnīri jānofiksē ar bloķēšanas tapām (mehānismi aizvērti ar ārējo vāku, kas novērš bloķēšanas tapu izkritumu).

Ja ortozes darbības zonā parādās nejutīgums vai sāpīgi simptomi, nekavējoties jākonsultējas ar ārstu speciālistu, rehabilitologu vai fizioterapeitu. Gaisa kameras nedrīkst pārmērīgi piepumpēt – tas var izraisīt hematomu, tūskas, pārmērīgi saspīestās ekstremitātes sāpju rašanos. Jākontrolē ādas izmaiņas, to parādīšanās gadījumā jāsamazina gaisa līmenis kamerās. Lai izstrādājums pareizi pildītu savu funkciju, tam jābūt pareizi atlasītam pēc izmēra. Produkta lietošanas laiks ir cieši saistīts ar disfunkcijas veidu un raksturu, un to nosaka ārsts speciālists, rehabilitologs vai fizioterapeits.

Sagatavošana lietošanai:

Izņemiet ortozi no iepakojuma. Rīkojieties saskaņā ar uzlikšanas instrukciju (zemāk).

Lietošanas beigšana:

Pēc lietošanas beigšanas jāizlaiž gaiss no pneimatiskās polsterēšanas, jāaizsprādz apkārtējās siksnas pareizās pozīcijās. Ortoze jāglabā sausā vietā, tālāk no uguns un asiem priekšmetiem. Neatstājiet ortozi spēcīgā saules gaismā (īpaši piepumpētu) – gaisa temperatūras paaugstināšanās iekšpusē (un līdz ar to spiediena) var izraisīt pneimatiskās polsterēšanas plīšanu.


Apkopes veids:

Polsterējumu jātīra ar sūkli, viegli samitrinātu siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli, piemēram, ziepēm, izvairoties no pārmērīgas ziepju lietošanas. Atcerieties labi izskalot, jo ziepes atliekas var izraisīt ādas kairinājumu. Nebalīniet, netīriet ķīmiski, negrieziet un neberziet. Žāvēt tālāk no siltuma avotiem, nežāvēt ar žāvētāju. Žāvēt izklātā veidā. Negludiniet. Korpusu tīrīt ar mitru lupatiņu.

Izstrādājuma lietošanas pārtraukšana:

Redzamu mehānisku bojājumu, materiāla nolietojuma gadījumā jāpārtrauc izstrādājuma lietošana. Katrs nopietns incidents, kas saistīts ar izstrādājumu, jāziņo ražotājam un medicīnas ierīču kontroles iestādei.


UZLIKŠANAS INSTRUKCIJA

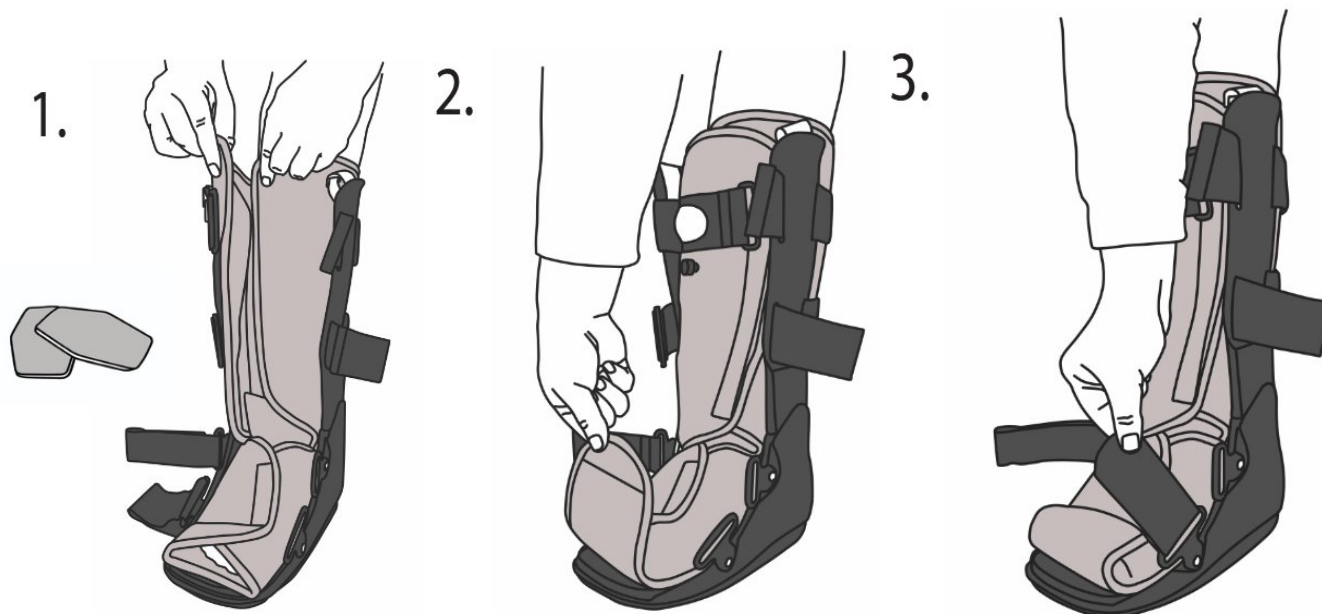

1. Atveriet polsterējumu, atsprādzējot apkārtējās lentes un āķus. Ievietojiet komplektā iekļautās starplikas polsterēšanā, lai iegūtu labāku anatomisko pielāgojumu. Novietojiet pēdu un kāju ortozē. Aptiniet un aizsprādzējiet polsterēšanu.

2. Ja nepieciešams, ar āķiem pievienojiet pirkstu aizsargu pie polsterējuma.

3. Pārbīdiet apkārtējās siksnas caur gareniskajām atverēm un secīgi aizsprādzējiet. Aizsprādzējiet pēdas, potītes un apakšstilba siksnas.

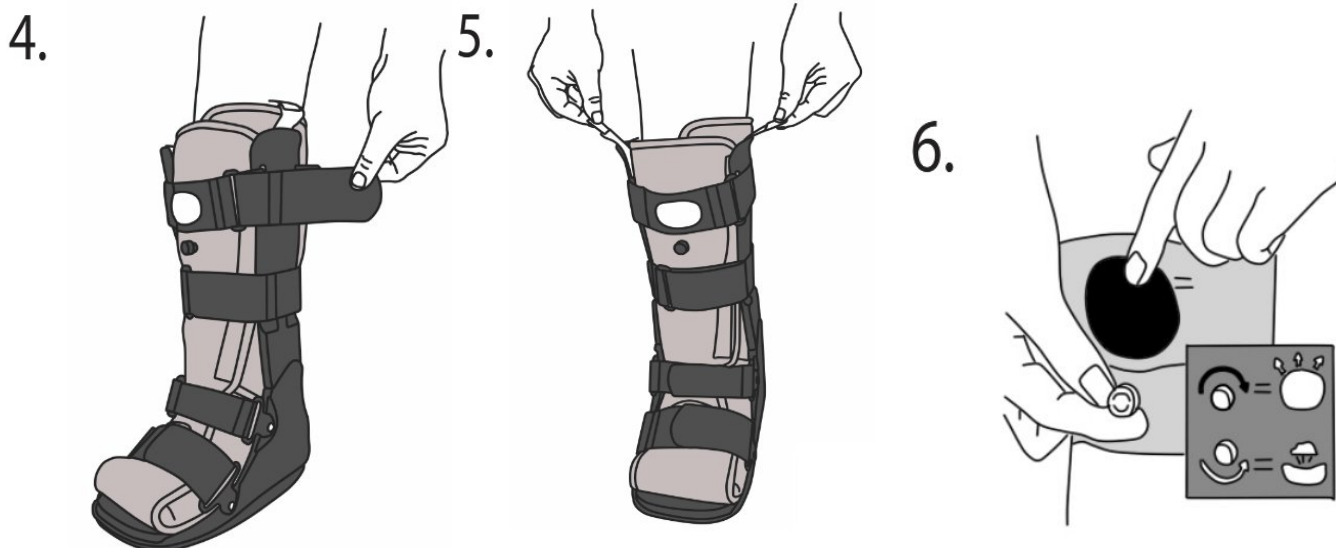

4 (tikai AR-606). Aizsprādzējiet siksnas, līdz tās ir ērti pielāgotas.


5 (tikai AR-606). Izvelciet drošības siksnas.

6. Gaisa vārsta lietošana:

Pārliecinieties, ka apaļais vārsts ir aizvērts – grieziet vārstu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ir aizvērts. Vārstu pagriežam līdz maigam pretestībai! **NEPĀRGRIEZT!!**

Pumpējiet pumpi, spiežot ar pirkstiem, līdz jūtat spiedienu pneimatiskajā polsterējumā.

Lai izlaistu gaisu, pagriežiet apaļo vārstu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un pagaidiet 15 sekundes, līdz gaiss tiek izlaists.

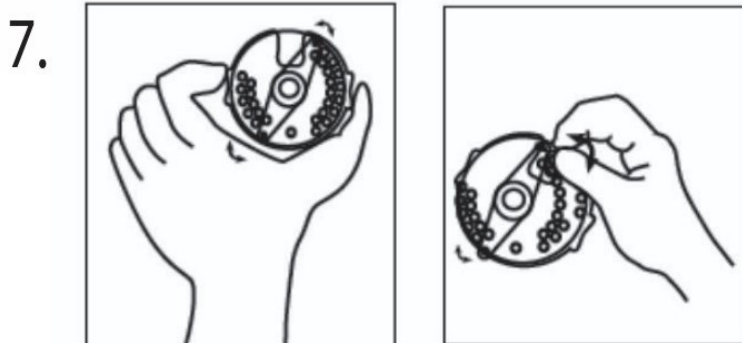

7. Sanu šinas regulēšana: 1) Pagriežiet mehānisma vāku tā, lai varētu izņemt bloķēšanas tapas. 2) Pēc bloķēšanas tapu izņemšanas iestatiet nepieciešamo kustību diapazonu. Pēc tam ievietojiet tapas, bloķējot mehānismu vēlamajā vērtībā. 3) Pabeidzot, pagriežiet vāku un aizveriet to.

UZMANĪGI IZLASIET: Brīdinājums!!!

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai ārsta uzraudzībā. Ja ortozes lietošanas laikā parādās jebkādas sāpes, tūska, ādas izmaiņas, jutīguma izmaiņas vai jebkādi netipiski simptomi, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ražotājs:

ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polija

tel./fakss: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-pasts: biuro@armedical.pl

Instrukcija atjaunota: 01.09.2023 (1. izdevums)